

www.endolite.co

Forming av stump

Bruk av silikon-liner før mål til
protese

Forming av stump

Silikon-liner

Silikonliner brukes for tidlig kompresjonsbehandling av legg-, kneex- og låramputerte.

Hovedformålet med silikon-lineren er:

- Redusere ødemer
- Forme den gjenværende stumpen
- Bidra til smertelindring
- Akselerere rehabiliteringsprosessen

Kompresjonsbehandlingen bør starte 5–7 dager postoperativt.

Best resultat oppnås når amputasjonsstumpen først har vært gipset rett etter operasjonen.

Fordeler:

Samme graderte kompresjonen oppnås uavhengig av hvem som setter på silikonhylsen.

Silikonlineren gir stumpen en god form før protesetilpassing (man ønsker ikke en pæreformet stump, den er vanskeligere å få laget protese til).

Silikonlineren beskytter stumpen og framskynder tidlig mobilisering/protesetilpassing.

Silikonlineren gir en gradert kompresjon som avtar oppover beinet. Silikonlineren har utvendig tøystoff som gjør av- og påtaking enklere.

Finnes i størrelsene:

18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, og 45




Mål omkrets av stump 4 cm opp fra stumpende.



Bilde 3 - mål omkretsen på stumpen 4 cm fra stumpenden. Ta et litt stramt mål.

Bestill liner hos ortopedisk verksted. Vi sender da 2 linere i forskjellige størrelser slik at man starter med den største og så går over til den minste størrelsen. Skulle det være behov for enda mindre linere, tar dere bare kontakt så sender vi flere linere i mindre størrelser.

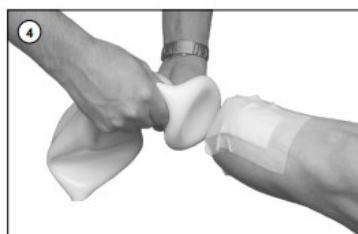

Bilde 4 og 5 - vrang silikonlineren helt. Press den mot stumpenden og rull oppover.



Bilde 6 - Lineren skal brukes 4 timer formiddag og 4 timer ettermiddag. Start med 1 time formiddag og 1 time ettermiddag første dagen. Øk med 1 time pr dag inntil man klarer å ha den på 8 timer totalt pr dag. 4+4 timer. Ved ubehag eller smerte, tas lineren av. Bruk surreskjema så personalet kan følge med på hvor lang tid man har hatt liner på fra dag til dag.



Rengjøring av liner: Vrang lineren slik at innsiden som er glatt vender ut. Rengjør med pH-balansert såpe, 100 % parfymefri og fargefri type. Bruk ikke syntetiske eller olje-baserte såper på liner.

Når lineren er rengjort, skylt godt og fjern såper-ester. Tørk så av med en myk klut og vrang liner med tøy ut og heng den over tørkestativet som følger med - **bilde 2**.

 @BlatchfordGrp  /BlatchfordGrp  /company/Blatchford

